


**MÄRKUS:** Enne jaotisega [Testimine] jätkamist täida kindlasti jaotises [Ettevalmistamine] kirjeldatud sammud.


### I Ettevalmistamine

1. Kontrolli ja veendu, et materjalid on ettevalmistatud ega ületa aegumiskuupäeva ning testkasseti ja ID-kiibi partinumbrid ühtivad.

2. Ühenda vooluvõrku ja lülita nupust sisse.

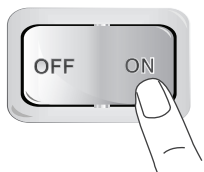

3. Sisesta ID-kiip ja vajuta ekraanil "ID Chip".

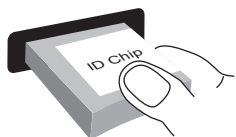

4. Vali "Sample Type" ja sisesta "Basic information".


### Täisveri sõrmeotsast

1. Torka patsiendi sõrme steriilse lantsetiga. Pühi esimene veretilk ära. Võta proovikogujaga horisontaalselt 8.5 µL täisvere proov.




**Märkus:**  
Veendu, et proovikoguja on asetatud horisontaalselt, sest muidu võib proov olla ebatäpne.

2. Purusta proovikogujaga õrnalt puhverlahuse tuubi tihenduskiile.

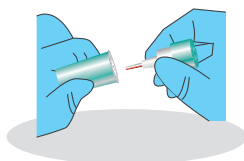

3. Pööra proovikogujat ettevaatlikult, kuni tuub on täielikult suletud.

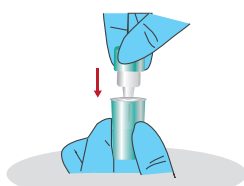


### II Testimine

4. Pööra tuubi umbes 10 korda üles-alla, kuni proov ja puhver on segunenud.




5. Eemalda puhveri tuubit õrnalt kaas ja pigista esimesed 2 tilka kaane sisse.

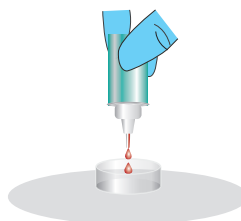

6. Pigista 3 tilka testkasseti proovisüvendisse.



7. Sisesta testkassett. Testimise alustamiseks vajuta "Start Test" (nt FS-113). Testi tulemused kuvatakse ekraanil 3 minuti möödudes.

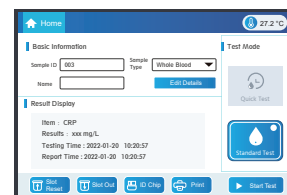

8. Testi tulemused saab vajadusel printida, vajutades "Print".




# CRV-testi kiirjuhend

## Kiirtest

Kiirtestirežiim sobib ainult professionaalidele.

Kataloog nr.: W201P0008

### Materjal

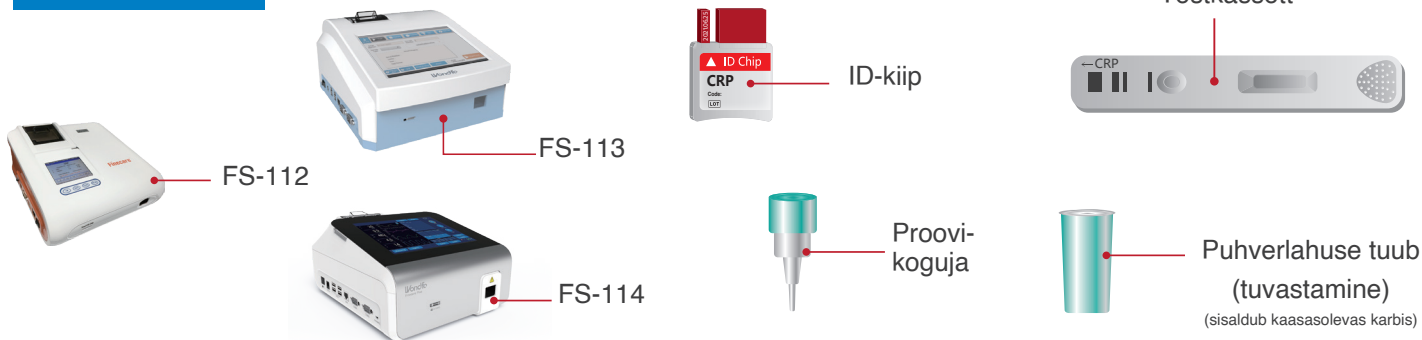


**MÄRKUS:** Enne jaotisega [Testimine] jätkamist täida kindlasti jaotises [Ettevalmistamine] kirjeldatud sammud.


### I Ettevalmistamine

1. Kontrolli ja veendu, et materjalid on ettevalmistatud ega ületa aegumiskuupäeva ning testkasseti ja ID-kiibi partii numbrid ühtivad.

2. Ühenda voluvõrku ja lülita nupust sisse.

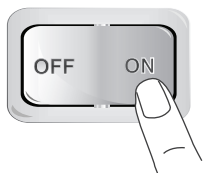


3. Sisesta ID-kiip ja vajuta ekraanil "ID Chip".

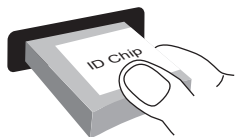

4. Vali "Sample Type" ja sisesta "Basic information".


### Täisveri sõrmeotsast

1. Torka patsiendi sõrme steriilse lantsetiga. Pühi esimene vere tilk ära. Võta proovikogujaga horisontaalselt 8.5 µL täisvere proov.

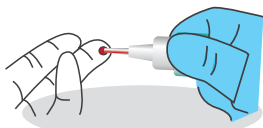


**Märkus:**  
Veendu, et proovikoguja on asetatud horisontaalselt, sest muidu võib proov olla ebatäpne.

2. Purusta proovikogujaga õrnalt puhverlahuse tuubi tihenduskele.

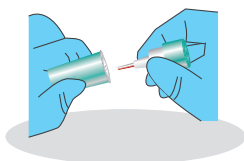

3. Pööra proovikogujat ettevaatlikult, kuni tuub on täielikult suletud.

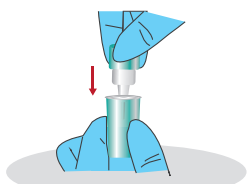


### II Testimine


4. Pööra tuubi umbes 10 korda üles-alla, kuni proov ja puhver on segunenud.



5. Eemalda puhveri tuubilt õrnalt kaas ja pigista esimesed 2 tilka kaane sisse.

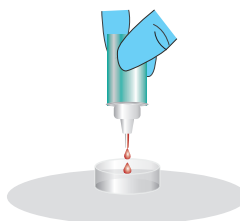

6. Pigista 3 tilka testkasseti proovisüvendisse.

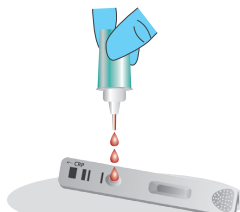

7. (Mudel nr.: FS-112, FS-113, FS-114): Seadista taimer ja käivita kohe. Jäta testkassett 3 minutiks toatemperatuurile.



8. Sisesta testkassett. Testimise alustamiseks vajuta "Start Test" (nt FS-113). Testi tulemused kuvatakse ekraanil.



9. Testi tulemused saab vajadusel printida, vajutades "Print".





文件编号Dokument Nr.: DLI-W201(1)-01-02 Versioon: 00

Infoleht koos kiirjuhendiga

尺寸(长\*宽)  
Mõõdud (p \* l): 210\*285mm

颜色:  C100M20  
M50Y100

材质: 80g铜版纸  
Materjal: 80g kaetud paber

工艺:

折页方式:

修改内容: 文字 颜色 尺寸 工艺 材质 其他 无

修改内容截图

改稿前编码:

申请人: 杨敏倩

设计师: 敖慧玲

设计时间: 2022/01/21

稿件确认签名: